

A-dec® 400

a dec®



Ce qui fait la différence d'A-dec

Vous pouvez compter sur les produits A-dec pour travailler de manière harmonieuse et rester concentré sur l'essentiel : *le patient*.

Réduisez les temps d'indisponibilité. Maintenez des coûts de possession peu élevés. Envisagez des performances à long terme.

Aucun autre fabricant d'équipement dentaire ne consacre autant de soin et d'efforts à la conception, à la réalisation et au suivi de ses produits. C'est la raison pour laquelle les dentistes, les écoles dentaires et les cliniques du monde entier font confiance à A-dec.



La garantie est désormais de 5 ans.







Accessible. Robuste. Élégant.

L'A-dec 400 allie design et fonctionnalité pour privilégier l'élégance plutôt que la complexité à un prix très attractif. Ne sacrifiez pas l'ergonomie de l'accès à la cavité buccale au confort du patient, mais profitez de ces deux avantages.

Et lorsque vous ajoutez la construction robuste, le style contemporain et la polyvalence gauche/droite, vous obtenez un unit représentant la valeur à long terme la plus sûre disponible sur le marché.

A-dec 400, une approche réfléchie de la conception du matériel dentaire.

Goûtez à une fiabilité légendaire.

Ingénierie soignée. Fonctionnalité anti-fatigue. Une sécurité à toute épreuve. La philosophie de conception d'A-dec consiste avant tout à innover et non à compliquer. Avec l'A-dec 400, vous investissez dans le confort. Jour après jour. Année après année.





Confort absolu

Le confort du patient est essentiel pour réduire son anxiété. Le fauteuil A-dec 400 est conçu pour mettre à l'aise votre patient.

Pivot virtuel. Permet de synchroniser le mouvement du fauteuil avec l'anatomie et les gestes du patient.

Tête à double articulation. Se règle facilement pour un positionnement optimal du patient.

Accoudoirs à deux positions. Combinent un support pour les bras/coudes et un design porteur robuste afin de faciliter l'entrée et la sortie du patient.

Repose-jambes à inclinaison. Permet au patient de reposer confortablement le bas de ses jambes.

Garniture luxueuse. Comprend des styles sobres sans couture et d'autres luxueux avec coutures dans toute une palette de couleurs.













Une carrière qui ne nuit pas à votre santé

Pour conjuguer productivité et longévité de carrière, vous devez travailler dans une position confortable. C'est pourquoi l'A-dec 400 est conçu pour assurer la fluidité et l'alignement ergonomique de vos mouvements.

Dossier souple ultrafin. Grâce à ce dossier ultrafin, votre patient est confortablement installé, soutenu par la tête à double articulation ; de votre côté, vous bénéficiez d'un accès optimal et pouvez placer confortablement vos genoux sous le fauteuil. Fruit de nombreuses années d'expérience, cette combinaison vous permet d'adopter une meilleure posture tout en améliorant l'accès à la cavité buccale.

Point de base bas. Permet au praticien de travailler confortablement, quelle que soit la hauteur.

Options de l'unit ergonomique. Instruments et accessoires sont à votre portée, pour que vous restiez concentré avec une économie de mouvements.





Polyvalence et compatibilité légendaire du A-dec 400



Comme tous les produits A-dec, le fauteuil A-dec 400 est conçu pour offrir un accès amélioré à l'équipe dentaire, un confort accru au patient et une fiabilité durable et sans contrainte.

Polyvalence gauche/droite pour une productivité accrue. Configuration ambidextre complète pour s'adapter aux différentes préférences des praticiens. L'unit Radius et les modules de maintien effectuent une rotation rapide autour du fauteuil pour assurer une compatibilité gauche/droite complète.

Lutte contre les infections de l'intérieur. Au cœur de l'unit se trouve un bloc de commandes conçu pour préserver la santé du patient et garantir des performances infaillibles. L'eau captive et stagnante est minimisée. De l'eau circule dès que vous activez vos instruments.

Système indépendant d'entretien du circuit d'eau. Contre les odeurs, les refoulements et la décomposition, les tubulures d'A-dec ont subi un traitement antimicrobien à l'AlphaSan®. Le tube de prélèvement de la bouteille de 2 litres et le raccord à démontage rapide facilitent le retrait et le remplacement tout en réduisant le risque de contamination croisée.

Complètement ambidextre.

Configurations selon la manière dont vous souhaitez travailler. Il est possible d'installer l'unit à l'avant du fauteuil, sur le côté, dans une armoire à l'arrière ou sur un panneau mural. Les instruments d'assistant permettent également l'inversion gauche/droite, avec un bras court ou long.





Intégration homogène

Le fauteuil A-dec 400 et l'unit A-dec 300 combinent à la perfection manœuvrabilité compacte et style authentique. L'unit A-dec 300 est conçu pour être petit à l'extérieur et grand à l'intérieur.

Commande simple et intelligente. La commande des instruments dentaires, des accessoires intégrés, du fauteuil et de l'éclairage dentaire est simplifiée grâce au clavier Deluxe et à la pédale de commande de l'A-dec 300. Préréglez la caméra intraorale, l'instrument à ultrasons, la lampe à polymériser et jusqu'à deux moteurs électriques.

Moderne et évolutive. La plateforme de l'unit vous permet d'intégrer les toutes dernières innovations en matière de produits cliniques et ainsi d'adapter votre matériel au fil des évolutions technologiques.

Bouton-poussoir pour le frein du bras flexible (sur certains modèles uniquement). Bloquez l'unit à la hauteur qui vous convient pour un confort ergonomique optimal.

Distribution ergonomique.

Ayez tous vos instruments et accessoires là où vous souhaitez qu'ils soient. Votre unit est disponible dans les styles Continental ou Traditional.



Options A-dec 400

Units

Quatre choix de présentation ergonomique pour vos instruments et accessoires : Unit A-dec 300 monté sur fauteuil Traditionnel et Continental ; Unit A-dec 500 monté sur meuble 12 o'clock duo et side.

Éclairage

Que vous choisissiez le modèle A-dec 300 ou 500 à LED, vous bénéficiez toujours d'une intensité lumineuse optimale et d'un spectre uniforme, sans zones d'ombre indésirables. Votre éclairage A-dec s'allume automatiquement lorsque le fauteuil s'incline, et s'éteint dès qu'il revient en position d'entrée/sortie.

Instruments d'assistant montés sur fauteuil

Disponible en bras court et bras long avec un clavier intégré. Choix d'un support 3 ou 4 positions simples ou d'un support 2 positions doubles.

Support d'écran

Le bras à double articulation comprend des chemins pour les câbles HDMI et d'alimentation. Le support d'écran de côté tourne à 430° et pivote jusqu'à 85° pour adapter la vue dans les positions assises ou allongées.

Crachoir

Fabriqué en porcelaine vitrifiée résistante aux taches. Pivote à $\pm 90^\circ$ pour un meilleur accès au patient. Les fonctions remplissage du gobelet et rinçage du crachoir sont programmables avec le clavier.



Garniture sans coutures



La couleur est un élément essentiel pour créer un environnement qui vous ressemble. C'est pourquoi A-dec vous propose une large gamme de coloris et différentes options pour coordonner les selleries Deluxe et lisses.



**Commandez vos échantillons sur la page
a-dec.com/InspireMe**

Garniture avec coutures



Les couleurs réelles peuvent être différentes. Pour des échantillons des couleurs et les dernières informations sur les produits, veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec.

Caractéristiques techniques

Fauteuil A-dec 411

Plage de la hauteur de levée	de 349 mm à 800 mm (de 13,75 po à 31,5 po) ; point bas 375 mm (14,75 po) avec support double
Longueur totale en extension maximale	1.829 mm (72 po)
Dossier fin flexible	25 mm (1 po)
Pivot du fauteuil	60° (30° de chaque côté du centre)
Inversion gauche/droite	Oui
Tête coulissante à double articulation	Oui
Alimentation électrique intégrée 300 watts	Oui
Commande au doigt ou pédale	Les deux
Motorisation	Motorisation hybride (inclinaison électromécanique, base hydraulique)
Options de la garniture	Avec ou sans coutures
Options du support d'écran	Éclairage, bras d'écran

Units

	A-dec 500 12 o'clock	A-dec 500 Side	A-dec 300
Bloc de commandes	4 positions	4 positions	3 positions standard, 4 positions en option
Conversion gauche/droite	Oui	Non	Oui
Positions du porte-instruments	4	4	4
Poignée(s) de frein	s.o.	1	1 standard, 2e en option
Clavier Deluxe disponible	Oui	Oui	Oui
Source de lumière intra-buccale quad-volt	Standard	Standard	En option
Pédale de commande	Commande humide/sec avec soufflette ou levier	Commande humide/sec avec soufflette ou levier	Commande humide/sec avec soufflette ou levier
Bras flexible équilibré avec freinage pneumatique	s.o.	Oui	Oui, à l'exception du modèle A-dec 336
Modèles	A-dec 541 12 o'clock duo	A-dec 542 side	Bras flexible équilibré avec freinage pneumatique A-dec 333 - Continental, montage sur Radius A-dec 335 - Continental, montage sur support A-dec 332 - Traditional, montage sur Radius A-dec 334 - Traditional, montage sur support Réglage manuel de la hauteur A-dec 336 - Traditional, montage sur Radius





Partenaire de votre réussite



A-dec restera votre partenaire tout au long de votre carrière de praticien. Depuis notre siège social de Newberg dans l'Oregon, nous intervenons auprès de bureaux internationaux et gérons un réseau de distributeurs agréés présents dans plus de 100 pays du monde entier.

Découvrez les plus d'A-dec. Visitez la page a-dec.com/TheDifference pour découvrir à quel point chaque détail d'une solution A-dec compte pour garantir la fiabilité et la longévité de votre investissement.



Siège social d'A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 États-Unis
Tél. : 1.800.547.1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : +1.503.538.7478 hors États-Unis/Canada
Télécopie : +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australie

Tél. : 1.800.225.010 en Australie
Tél. : +61.(0)2.8332.4000 hors de l'Australie

A-dec Chine

Tél. : 400.600.5434 en Chine
Tél. : +86.571.89026088 hors de Chine

A-dec United Kingdom

Tél. : 0800.233285 au Royaume-Uni
Tél. : +44.(0).24.7635.0901 hors du Royaume-Uni



Les couleurs et les produits pourront être différents selon la matière employée et ils sont sujets à modification sans préavis. Pour des échantillons des couleurs et les dernières informations sur les produits, veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec.

Toutes les marques commerciales figurant dans le présent document sont sujettes aux droits de propriété d'A-dec, de ses sociétés affiliées et de leurs fournisseurs communs aux États-Unis ainsi qu'à l'étranger.

© 2021 A-dec Inc. Tous droits réservés.
85.0393.01/E-only/4-21/Rev D