

ROZTWORY DO CZYSZCZENIA LINII
WODNYCH UNITU STOMATOLOGICZNEGO

ICX® & ICX Renew®



Konserwacja linii wodnych: Dlaczego jest istotna?


Pacjenci ufają, że woda używana w ich jamie ustnej jest najwyższej jakości. Niestety, to nie musi być prawda. Niewielka średnica i małe natężenie przepływu wody w liniach wodnych unitów stomatologicznych może sprzyjać rozwojowi bakterii, wskutek czego woda na wyjściu roi się od mikroorganizmów.

Badania wykazały, że liczba drobnoustrojów może przekroczyć 200 000 jednostek tworzących kolonie na mililitr w ciągu 5 dni.¹ W rzeczywistości zgłaszano liczby bakterii wynoszące nawet 1 000 000 CFU/ml.² Jeśli nie podejmuje się kroków w celu zapobiegania i eliminowania mikroorganizmów, nie ma powodów, aby sądzić, że którykolwiek unit stomatologiczny może uniknąć kolonizacji bakteryjnej.

1. Louis G. DePaola, D.D.S., MS.; Denis Mangan, Ph.D.; Shannon E. Mills, D.D.S.; William Costerton, Ph.D.; Jean Barbeau, Ph.D.; Brian Shearer, Ph.D.; John Bartlett, M.D. A review of the science regarding dental unit waterlines, ADA, Vol. 133, September 2002, p. 1199.

2. Jean Barbeau, Richard Tanguay, Esther Faucher, Catherine Avezard, Luc Trudel, Ludger Cote, André P. Prévost; Multiparametric Analysis of Waterline Contamination in Dental Units, Applied and environmental Microbiology, November 1996, p. 3954. Copyright 1996, American Society for Microbiology.

CZY TWOI PACJENCI SĄ CHRONIENI?

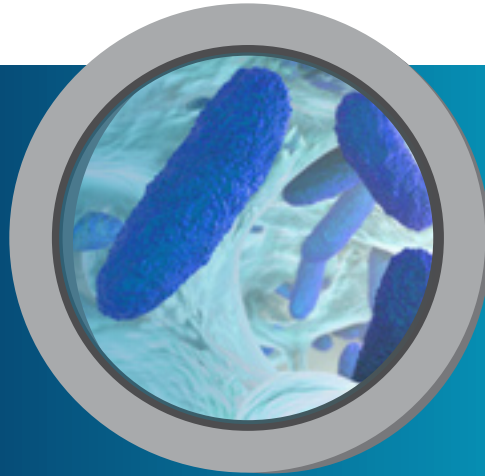

liczba drobnoustrojów
może osiągnąć

>200 000 (CFU/ml)



≈ 5 DNI

jeśli nie czyścić

JAKOŚĆ

WODY

Wytyczne

Wytyczne lub wymagania dotyczące jakości wody w unitach stomatologicznych różnią się w zależności od regionu i zazwyczaj są określone w jednostkach tworzących kolonie na mililitr (CFU/ml).

100 CFU/ml Wielka Brytania, UE

200 CFU/ml Australia

500 CFU/ml Stany Zjednoczone

Należy przestrzegać najnowszych zaleceń w danej lokalizacji.

100

200

500

Konserwacja. Monitorowanie. Czyszczenie szokowe. **Trzy kroki czyszczenia.**

Co można zrobić, aby zapewnić pacjentom wodę najwyższej jakości? Oprócz codziennego protokołu konserwacji linii wodnych ważne jest, aby monitorować jakość wody i okresowo czyścić szokowo linie w celu usunięcia osadów i zanieczyszczeń. Te trzy kroki pozwalają utrzymać linie wodne unitu stomatologicznego w dobrym stanie.



1. KONSERWACJA

Codzienna konserwacja linii wodnych.

Środek do kontroli higieny wody A-dec® ICX® ma specjalny skład przeznaczony do konserwacji linii wodnych unitu stomatologicznego i zapobiegania nieprzyjemnemu zapachowi oraz smakowi wskutek rozwoju bakterii poprzez utrzymywanie wody w przewodach wodnych unitu stomatologicznego na poziomie ≤ 10 CFU/ml. To łatwe. Wystarczy wrzucić nową tabletkę środka ICX do pustej butelki systemu zamkniętego obiegu wody przy każdym jej napełnianiu. Środek ICX pozostaje aktywny w systemie przez co najmniej dwa tygodnie.

2. MONITOROWANIE

Regularne monitorowanie jakości wody.

Procedury czyszczenia szokowego będą zależeć od wymagań PZH co do jakości wody. Częstotliwość tych procedur powinna być skorelowana od wyników badań jakości wody. Na początku wodę należy badać raz w miesiącu. Jeżeli wyniki nie przekroczą poziomu ustalonego dla działania przez trzy kolejne miesiące, można zmniejszyć częstotliwość badań do jednego na trzy miesiące. Badanie to powinno zapewniać ilościowy pomiar bakterii heterotroficzych.

Dystrybutor może polecić zestaw do monitorowania wody lub usługę laboratoryjną, która pomoże w tym kroku.

3. CZYSZCZENIE SZOKOWE

W razie potrzeby czyszczenie szokowe linii wodnych.

Gdy poziom bakterii w liniach wodnych przekroczy zalecany poziom jakości wody, należy wykonać czyszczenie szokowe. Czyszczenie szokowe usuwa osady i bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i smak z linii wodnych unitu stomatologicznego. A-dec zaleca czyszczenie szokowe linii wodnych unitu stomatologicznego środkiem ICX Renew® przed pierwszym użyciem systemu. Po pierwszym użyciu należy czyścić szokowo linie wodne za każdym razem, gdy wyniki badań wykażą, że poziom bakterii jest wyższy niż poziom jakości wody ustalony dla działania. Wznowić stosowanie tabletek ICX do bieżącej konserwacji linii wodnych.

A-DEC ZALECA

Wykonywanie czyszczenia szokowego, gdy poziom bakterii w liniach wodnych unitu stomatologicznego przekracza zalecany poziom ustalony dla działania.



Jeśli wyniki badania w CFU/ml są $<$ normy jakości wody $=$ kontynuować codzienną konserwację środkiem ICX



Tabletki A-dec ICX do codziennego czyszczenia




Jeśli wyniki badania w CFU/ml są $>$ normy jakości wody $=$ oczyścić szokowo linie wodne środkiem ICX Renew



Środek A-dec ICX Renew czyszczenia szokowego

W RAZIE CZYSZCZENIA SZOKOWEGO, POZWOLIĆ, ABY ŚRODEK ICX RENEW

pozostawał przez noc

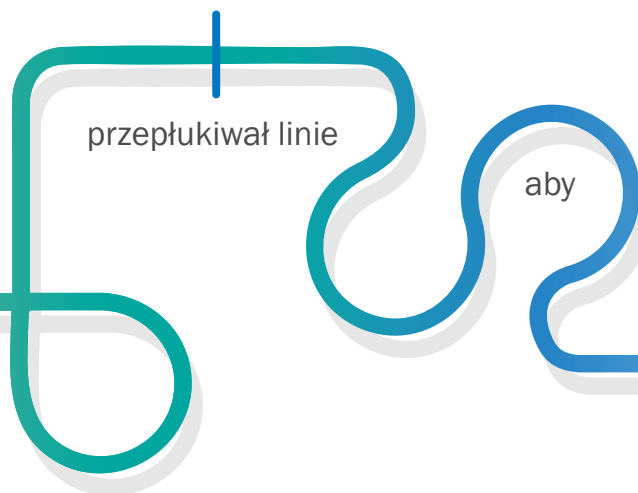

OCZYŚCIĆ

Rozwiązanie A-dec do czyszczenia linii wodnych.

Prostota. Skuteczność. Przystępna cena.

Konserwacja

Środek ICX w tabletkach do kontroli higieny wody

Musujące tabletki ICX wykonują całą pracę, więc nie ma potrzeby ich odmierzania ani mieszania. Wystarczy przed każdym napełnieniem dodać jedną tabletkę do pustej butelki w systemie zamkniętego obiegu wody. Tabletka rozpuszczając się uwalnia składniki do wody, co pozwala utrzymać poziom CFU nie większy niż 10 (CFU/ml), a tym samym zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi i smakowi wskutek rozwoju bakterii. Środek ICX działa w systemie wodnym unitu przy każdym czyszczeniu, chroniąc linie wodne przed dalszym zanieczyszczeniem i ograniczając konieczność częstego czyszczenia szokowego.

Zalety środka ICX

- Utrzymuje zanieczyszczenia z linii wodnych unitu stomatologicznego na poziomie ≤ 10 CFU/ml.
- Zmniejsza odkładanie się osadów.
- Ciągłe obecny w wodzie; zapewnia profilaktyczne, proaktywne rozwiązanie.
- Pozostaje aktywny w wodzie do dwóch tygodni w okresach nieużywania sprzętu.
- Eliminuje potrzebę przeczyszczania linii wodnych w nocy.
- Nie ma wpływu podczas stosowania wraz z materiałami kompozytowymi. Nie wpływa na siłę ich wiązania.
- Łagodny dla sprzętu dentystycznego.



Dostępny do dwóch rozmiarach.
Sprzedawany w pudełkach po 50 sztuk.

W połączeniu z regularnymi badaniami i przestrzeganiem protokołów, środki A-dec ICX i ICX Renew upraszczają system konserwacji linii wodnych. Są gotowe do użycia i nie zawierają agresywnych środków chemicznych, a czyszczenie linii wodnych unitów stomatologicznych produktami ICX chroni naszą inwestycję.

Czyszczenie szokowe

Czyszczenie szokowe linii wodnych unitu stomatologicznego środkiem ICX Renew

Czyszczenie szokowe szybko działającym roztworem usuwa nieprzyjemny zapach i smak wynikłe z rozwoju bakterii w liniach wodnych unitu stomatologicznego. Wystarczy zmieszać oba roztwory w pustej butelce na wodę, przepuścić przez linie i zostawić na noc. Niebieska barwa poprawia widoczność i wskazuje, że roztwór jest w liniach wodnych. Po zakończeniu czyszczenia szokowego należy przepłukać linie wodą i wznowić normalne użytkowanie.

Zalety środka ICX Renew

- Penetruje i usuwa nagromadzone bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i smak.
- Niebieski kolor wskazuje, że roztwór działa w liniach wodnych.
- Nieżrący i łagodny dla sprzętu.
- Nie powoduje korozji ani zatykania linii wodnych.
- Bezwonny skład.



Dwuskładnikowy roztwór.
Dziewięć zabiegów przy wykorzystaniu jednego pudełka.

Produkty ICX są dystrybuowane wyłącznie przez sieć autoryzowanych dystrybutorów firmy A-dec na całym świecie.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę a-dec.com lub skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

Reliable Creative Solutions


FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE




KONSERWACJA ROZTWORAMI ICX I ICX RENEW.

 @A-decDental

 @A-decDental

 @A-dec Inc.

 @AdecDental

 @A-dec Inc.

Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 USA

T: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie

T: +1 503 538 7478 spoza USA i Kanady

a-dec.com

A-dec Australia

T: 1 800 225 010 w Australii

T: +61 (0) 2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny

T: 400 600 5434 w Chinach

T: +86 571 89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

T: 0800 233285 w Wielkiej Brytanii

T: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zapoznania się z najnowszą ofertą oraz kolorystyką tapicerek zapraszamy do salonów autoryzowanych dystrybutorów firmy A-dec. Wszystkie znaki towarowe występujące w tym dokumencie są znakami towarowymi należącymi do firmy A-dec, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich wspólnych dostawców w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2023 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 85.0884.18/BB/500/9-22(10-23)/RevA2

The logo for A-dec, featuring a stylized blue 'a' with a caduceus symbol inside it, followed by the word 'dec' in a bold, blue, sans-serif font.