

Elenco di controllo dell'installazione del riunito A-dec 300/400/500

Per ulteriori informazioni dettagliate, consultare i manuali d'installazione della poltrona odontoiatrica e dei moduli opzionali.

Modello	S/N	Modello	S/N
Poltrona odontoiatrica:		Lampada odontoiatrica:	
Faretra odontoiatrica:		Strumentazione assistente:	
Centro di supporto:		Altro:	

Poltrona odontoiatrica

- Verificare il raggio di movimento nella sala operatoria. Se necessario, regolare l'altezza massima della poltrona per evitare collisioni.
- La poltrona odontoiatrica è ancorata saldamente al pavimento.
- La poltrona funziona correttamente, compresi il movimento in verticale/orizzontale e le funzioni programmabili controllate dal touchpad e dalla pedaliera di comando poltrona.
- Verificare che l'interruttore di arresto si attivi correttamente.
- Il poggiatesta funziona correttamente.

Faretra odontoiatrica

- I manipoli funzionano correttamente e sono impostati con le preferenze del medico:
 - Acqua di raffreddamento, aria di raffreddamento e spray.
 - Lavaggio dei cordoni del manipolo.
 - Valvole e interruttori dell'alloggio manipoli.
 - Pressione dell'aria motrice del manipolo.
- Se in dotazione: il braccio pantografato a molla è controbilanciato correttamente.
- Il freno pneumatico del braccio pantografato funziona correttamente.
- Solo 336:** il perno di arresto rotazione è installato e funziona correttamente.
- Solo 336:** l'altezza della regolazione manuale del braccio e la tensione di rotazione sono impostate.
- La faretra è in bolla. **Solo faretra odontoiatrica 300:** posizionare la livella sul tray per la misurazione.
- I bracci articolati sono stabili.
- La pedaliera comando strumenti funziona correttamente.

Lampada odontoiatrica

- Tutte le impostazioni e i comandi della lampada funzionano correttamente.
- La tensione del braccio pantografato e della testa della lampada odontoiatrica è stata regolata in modo corretto.

Strumentazione assistente, bacinella e riempimento bicchiere

- L'aspirazione è impostata con le seguenti specifiche:
 - Aspirazione umida:** 34 ± 7 KPa (10 ± 2 pollici di Hg), 255 sl/min (9 SCFM) minimo
 - Aspirazione secca/semi-secca:** $16 \pm 3,5$ KPa ($4,5 \pm 1$ pollici di Hg), 340 sl/min (12 SCFM) minimo
- I pulsanti per la siringa di aria e acqua funzionano correttamente.
- Le valvole dell'aspiratore chirurgico e dell'aspirasaliva si muovono senza ostacoli.
- La temporizzazione del riempimento bicchiere è impostata correttamente.
- Il tragitto dell'acqua nella bacinella ne consente un efficace risciacquo e la bacinella si scarica correttamente.

- Solo 361, 362 e 363: l'estremità del tubo di ventilazione della bacinella si trova 13 mm (1/2 pollice) sopra il telaio del centro di supporto.
- Solo 361 e 363: la distanza tra la bacinella e il bracciolo è pari a 29 mm (1-1/8 pollice).

UtENZE

- La pressione dell'aria alla faretra odontoiatrica è regolata su 552 kPa (5,52 bar).
- La pressione dell'aria al modulo di controllo dell'aria avanzato è regolata su 586 kPa (5,86 bar).
- La scatola allacciamenti a pavimento non presenta perdite di aria o di acqua.
- Lo scarico a gravità funziona correttamente.
- I tubi e i collegamenti non sono piegati e non presentano perdite di aria o di acqua.
- I tubi e i cavi in eccesso sono avvolti a spirale e fissati lontano dalle parti in movimento.

Medico/Clinica:

Indirizzo:

Telefono:

Data installazione:

Rivenditore/Filiale:

Installatore:

Sala operatoria:

Note:

Rivisto con il medico/cliente:

Firma

Data

Medico/Cliente non disponibile per la revisione dell'elenco di controllo



Sede centrale A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 Stati Uniti

Tel: 1.800.547.1883 in Stati Uniti/CANADA

Tel: +1.503.538.7478 al di fuori di Stati Uniti/CANADA

Fax: 1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec Inc. non fornisce garanzie di alcun tipo riguardo al contenuto del presente documento, incluse, senza limitazioni, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.

a dec[®]
reliablecreativesolutions[®]



86.0248.04 Rev D
Data di rilascio 2020-03-31
Copyright 2020 A-dec Inc.
Tutti i diritti riservati.
IGrphpor18