

Kontrolní seznam pro instalaci zubařského křesla a modulů A-Dec 200

Podrobnější informace najdete v instalačních příručkách k zubařskému křeslu a volitelným modulům.

	Model	Sériové číslo		Model	Sériové číslo
Křeslo:	200		Světlo:		
Stomatologický unit:			Nástroje asistenta:	200	
Blok podpory:	200		Jiné:		

Zubařské křeslo

- Zubařské křeslo je bezpečně ukotveno k podlaze.
- Křeslo řádně funguje, včetně funkcí zvedání a náklonu a programovatelných funkcí ovládaných pomocí ovládacích panelů a nožního spínače.
- Opěrka hlavy řádně funguje.
- Opěrky rukou fungují správně.
- Zarážka funguje správně.

Stomatologický unit

- Násadce řádně fungují a jsou nastaveny podle požadavků lékaře:
 - Vodní chlazení, vzduchové chlazení a rozstřík
 - Proplach hadiček násadců
 - Ventily a spínače na držácích násadců
 - Tlak vzduchového pohonu násadců
- Flexibilní rameno je správně vyváženo.
- Napětí při polohování flexibilního ramena je nastaveno správně.
- Jsou nainstalovány kolíky zarážky otáčení flexibilního ramena.
- Otočný unit je vyrovnaný podle značek na horní části otočného unitu.
- Kloubová ramena se nevychylují.
- Nožní ovladač řádně funguje.

Operační světlo

- Všechna nastavení a ovládací prvky světla fungují správně.
- Napětí flexibilního ramena a hlavice jsou správně seřízena.
- Je nainstalován kolík zarážky otáčení flexibilního ramena.

Nástroje asistenta, plivátko a plnění kelímku

- Podtlak/sání jsou nastaveny podle následujících specifikací:
 - Mokrý podtlak** – 34 ± 7 kPa (10 ± 2 palců Hg), minimálně 255 sl/min (9 scfm)
 - Suchý/polosuchý podtlak** – $16 \pm 3,5$ kPa ($4,5 \pm 1$ palce Hg), minimálně 340 sl/min (12 scfm)
- Tlačítka vzduchové i vodní pistole fungují bez problémů.
- Ventily vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin se volně pohybují.
- Doba plnění kelímku je správně nastavena.
- Profil průtoku plivátkem zajišťuje účinné oplachování misky a výpust misky je plně funkční.

Přívody

- Nastavená hodnota regulovaného tlaku vzduchu činí 552 kPa (80 psi).
- V rozvodné krabici na podlaze nedochází k únikům vzduchu a vody.
- Spádový odtok funguje správně.
- Hadičky a připojení nejsou zalomené a nevykazují známky úniku vody a vzduchu.
- Nadměrně dlouhé úseky hadiček a vodičů jsou svinuty a uloženy tak, aby nemohly přijít do styku s pohyblivými součástmi.

Lékař / klinika:

Adresa:

Telefon:

Datum instalace:

Prodejce / pobočka:

Instalaci provedl:

Ordinace:

Poznámky:

Zkontrolováno s lékařem / zákazníkem:

Podpis

Datum

Kontrola seznamu provedena bez lékaře / zákazníka



Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 USA
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě
Tel.: 1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
Fax: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

Společnost A-dec Inc. neposkytuje žádnou záruku na obsah tohoto dokumentu, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti ke konkrétnímu účelu, nikoli však s omezením pouze na tyto záruky.