

A-dec 杆式脚控开关 安装指南



本文中涉及的产品型号和版本

型号	版本	描述
200	A	牙科治疗台
332/333/334 335/336	A	牙科治疗台
532/533/541 Performer	A/B B	牙科治疗台
牙科模拟器械	A	牙科治疗台
系统使用 Century Plus 总 控阀构建	A	牙科治疗台



备注 有关杆式脚控开关与 A-dec 产品的兼容性方面的问题，请联系 A-dec 客户服务部门。

推荐工具

- 全套六角扳手
- 斜嘴钳
- 套筒推杆
- 防静电护腕带

准备安装

1. 关闭系统电源。



危险 未关闭或切断电源即继续此过程可能会导致产品损坏或严重的人身伤害甚至死亡。



警告 取下或装回罩盖时，注意不要损坏任何电线或导管。装回罩盖后，请确认其是否牢固。


2. 从治疗椅底座取下罩盖。
3. 如果配有圆盘脚控开关，则从底座的固线托架取下该圆盘脚控开关软管，并断开该软管与管束的连接。



备注 可反转杆式脚控开关功能（左方向更改为干态，右方向更改为湿态）。有关详细信息，请联系 A-dec 客户服务部门。

安装杆式脚控开关

1. 将杆式脚控开关软管从治疗椅的椅背穿过固线托架。
2. 脚控开关软管固定在治疗椅底座的固线托架中。
3. 将杆式脚控开关中的软管连接到对应颜色且带有横线图案的软管。

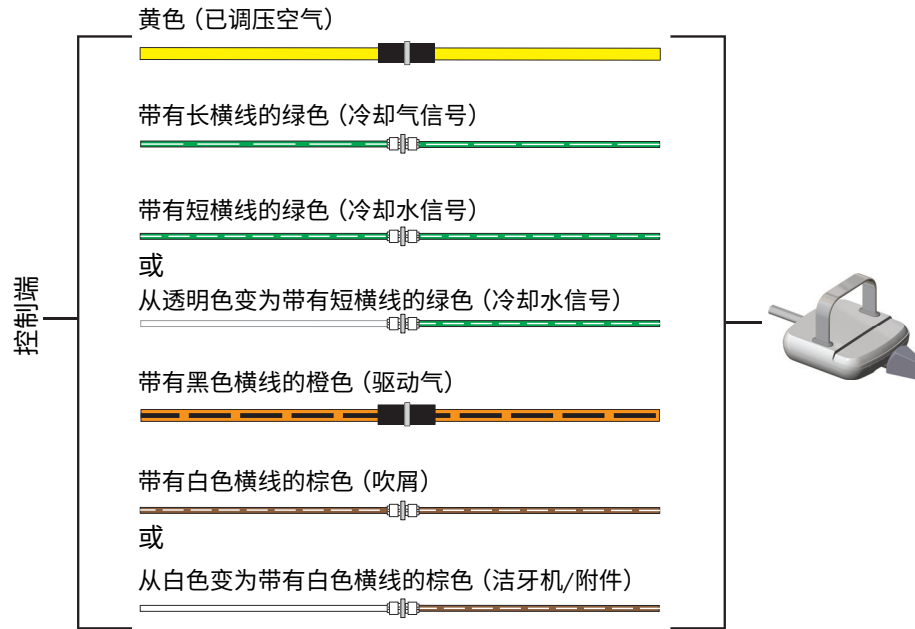

4. 更换治疗椅底座罩盖。

完成安装

- 如果安装在 A-dec 500 系统上, 请参见第 3 页的“仅 A-dec 500 系统: 调整治疗台软管”。
- 如果更换 A-dec 500 或 A-dec 200 总控阀以外的 A-dec 系统上的具有功能附件/吹屑按钮的圆盘脚控开关, 请参见第 6 页的“测试牙科治疗机”。
- 如果在 Performer 总控阀上更换不具有功能附件按钮的圆盘脚控开关, 将插头插入松开的棕色软管末端然后参见第 6 页的“测试牙科治疗机”。

- 如果在具有 A-dec 300 总控阀或 Century Plus® 总控阀的系统上更换不具有功能附件/吹屑按钮的圆盘脚控开关, 请参见本页的“A-dec 300 或 Century Plus 总控阀”。

A-dec 300 或 Century Plus 总控阀


参照这些步骤, 更换不具有功能附件/吹屑按钮的圆盘脚控开关。



备注 只有治疗台的棕色吹屑气软管安装在总控阀上, 杆式脚控开关上的吹屑功能才能运行。

A-dec 300 总控阀


1. 取下治疗台上盖。
2. 如果棕色的吹屑气软管未连接到总控阀, 请使用套件 (p/n 90.1546.00) 中的零件连接到该软管:
 - (1) 将止回阀连接到吹屑气软管。
 - (2) 将塔状接头端子和软管接入总控阀中。

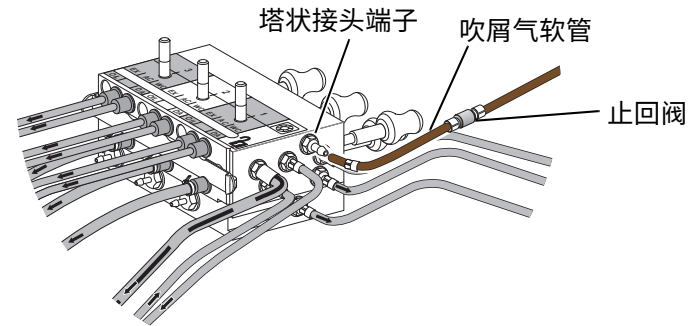

3. 更换治疗台上盖。
4. 请参见第 6 页的“测试牙科治疗机”。

Century Plus 总控阀

1. 取下治疗台上盖。
2. 如果棕色的吹屑气软管未连接到总控阀，请将软管连接到合适的塔状接头端子。

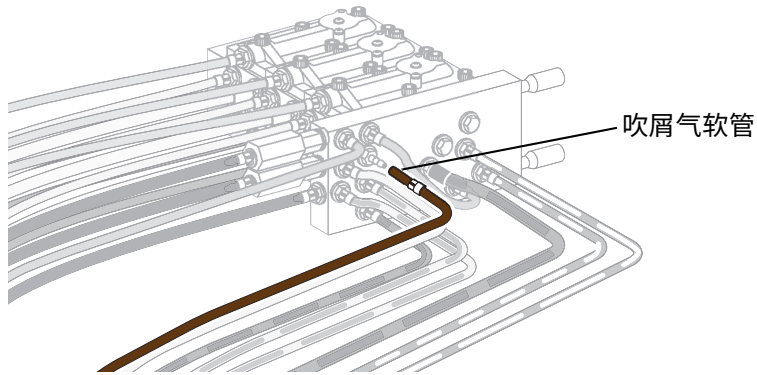

3. 更换治疗台上盖。
4. 请参见第 6 页的“测试牙科治疗机”。

仅 A-dec 500 系统 调整治疗台软管




注意 电路板对静电敏感。触摸电路板、或对电路板进行任何操作时，必须采取防静电 (ESD) 预防措施。电路板应仅由电工或合格的维修人员来安装。

仅 532A/533A




备注 如果您的 A-dec 500 系统配备了 Deluxe 或 Deluxe Plus 触控板，冷却水按钮将被禁用。仅从杆式脚控开关才能控制冷却水流。触控板上的冷却水指示器可能不再与冷却水的状态 (开或关) 相一致。

1. 取下治疗台上盖。
2. 从电路板压力传感器切断清洁水管。
3. 找到已连接到冷却水螺线管 (Deluxe 触控板) 或冷却水继电器 (标准触控板) 的带短划线的绿色软管。保留该软管在螺线管或继电器上的安装状态。
4. 从梭阀中取下带短划线的绿色软管的末端。

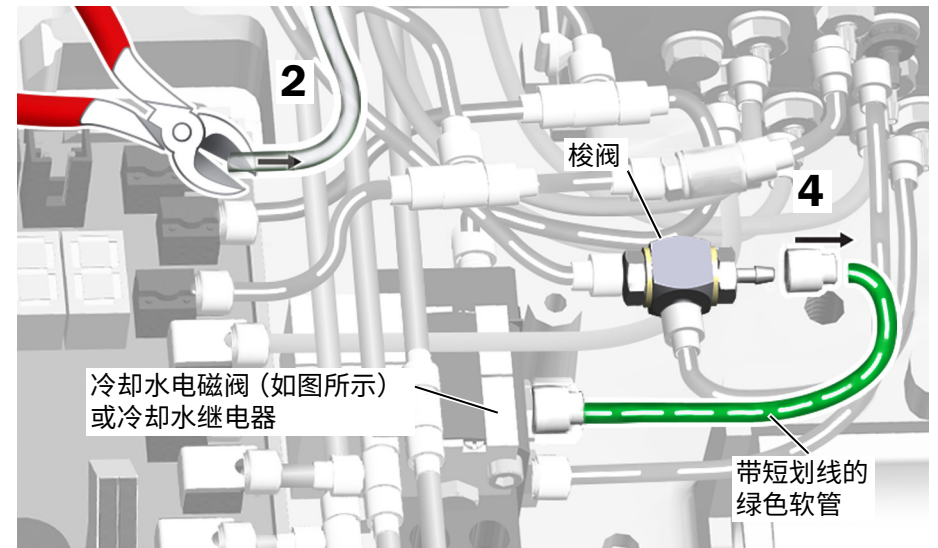

5. 将标准夹具滑至步骤 2 中切断的清洁水管，并将该软管连接到梭阀。
6. 将插头插入步骤 4 中拆下的带短划线的绿色软管的末端。

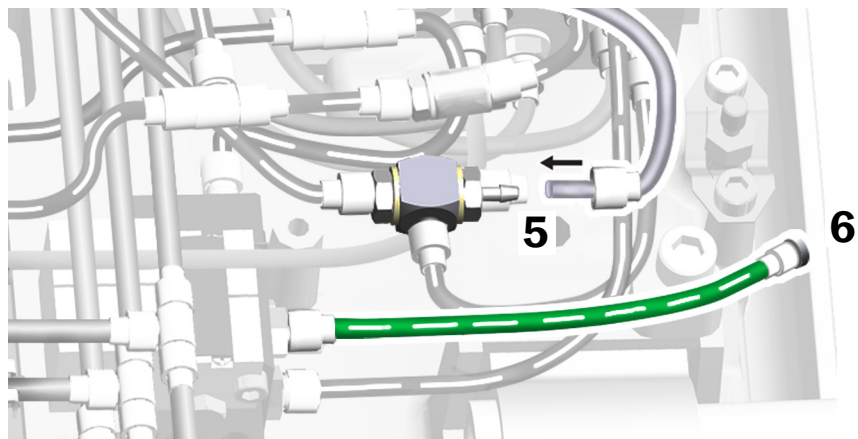


7. 更换治疗台上盖。
8. 请参见第 6 页的“测试牙科治疗机”。

仅 532B/533B




备注 安装杆式脚控开关时，冷却水按钮被禁用。仅从杆式脚控开关才能控制冷却水流。触控板上的冷却水指示器可能不再与冷却水的状态（开或关）相一致。

1. 取下治疗台上盖。
2. 从内联连接器处的电路板压力传感器断开透明软管。

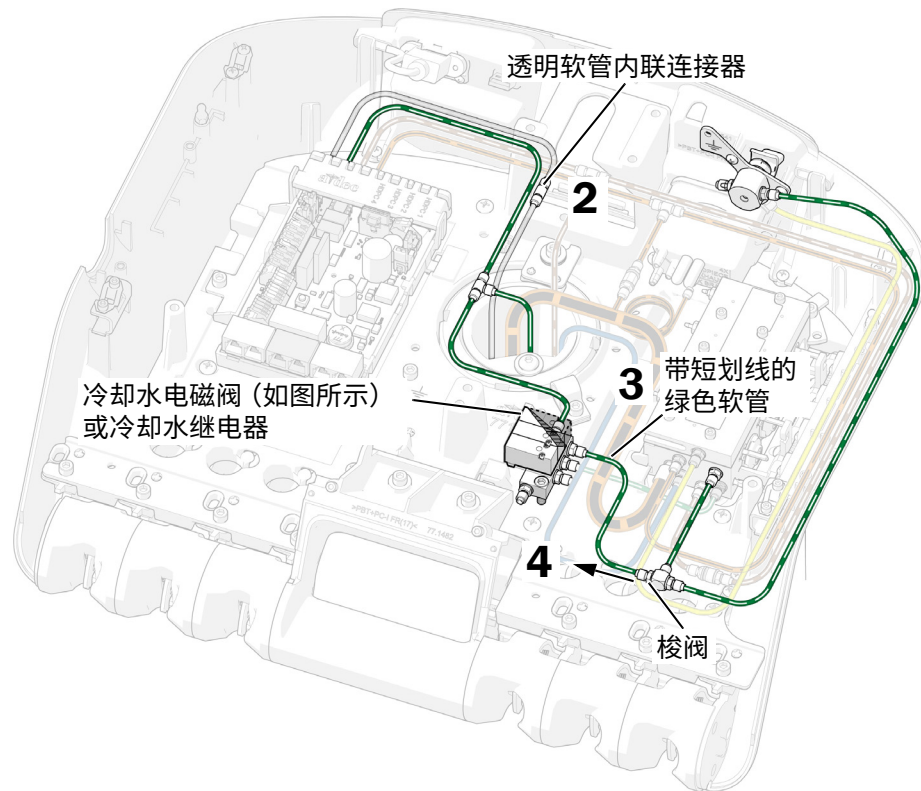

3. 找到连接至冷却水电磁阀的带短划线的绿色软管。保留该软管在螺线管或继电器上的安装状态。
4. 从梭阀中取下带短划线的绿色软管的末端。
5. 将标准夹具滑至步骤 2 中断开连接的清洁水管，并将该软管连接到梭阀。
6. 将插头插入步骤 4 中拆下的带短划线的绿色软管的末端。
7. 更换治疗台上盖。
8. 请参见第 6 页的“测试牙科治疗机”。

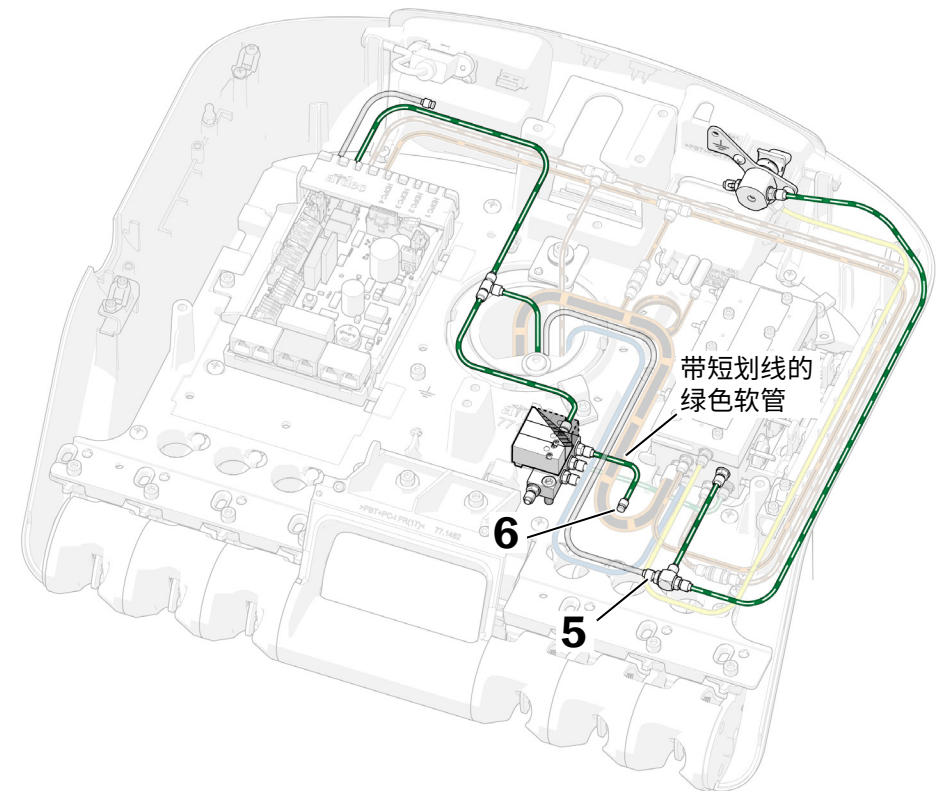

测试牙科治疗机

1. 打开治疗台并检查所有新连接中是否存在泄漏。
2. 从挂架上提出牙科手机。通过将杆式脚控开关移至一侧（左侧 = 湿态，右侧 = 干态），来激活该牙科手机。
3. 指导牙科团队如何操作和维护脚控开关。

监管信息和质量保证

有关所需的监管信息和 A-dec 质量保证, 请参见 *监管信息和规格文档* (p/n 86.0221.06), 该文档位于 www.a-dec.com 的资源中心。



A-dec 总部, 2601 Crestview Drive, Newberg, OR 97132 美国

电话: 1.800.547.1883 (美国 / 加拿大境内), 电话: 1.503.538.7478 (美国 / 加拿大境外)
www.a-dec.com

A-dec Inc. 对本文件中的内容不做任何保证, 包括但不限于商品适销性和针对特定目的的适用性的任何暗示保证。

86.0565.06 Rev C
2019 A-dec Inc. 版权所有
保留所有权利。
IGgphland9